

Специализированный излучатель для женщин

«Режим № 8»

Предназначен для оптимизации функциональных резервов и адаптивных возможностей организма человека, сниженных в процессе неблагоприятного воздействия факторов среды, деятельности или в результате болезни.

Категория пользователей: предназначен для женщин старше 35 лет.

Действие: общеукрепляющего действия с учетом особенностей пола (психоэмоциональная сфера, нейрогуморальная регуляция).

Механизм действия. Режим (несущая частоты КВЧ-сигнала, частота низкочастотной модуляции, временные и амплитудные параметры), подобран специально и позволяет оказать системное воздействие на женский организм.

Курсовое применение излучателя **«Режим № 8»** позволяет нормализовать трофические и метаболические процессы в отдельных клетках и тканях, восстанавливать их структуру, совершенствовать регуляцию функций на уровне отдельных систем и всего организма, повышать общую (неспецифическую) резистентность организма. Положительный эффект достигается за счет биорезонансных откликов клеток, отдельных анатомо-физиологических систем и центральных структур нейрогуморальной регуляции с одной стороны, и активации адаптационных механизмов (общий адаптационный синдром) с другой.

Показания:

- 1) Снижение работоспособности и настроения, повышение утомляемости, психоэмоциональное возбуждение, нарушения сна, вызванные переутомлением и хроническим утомлением;
- 2) неспецифическая профилактика заболеваний женской половой сферы, климакса, укрепление репродуктивного и сексуального здоровья;
- 3) склонность к частым простудным заболеваниям;
- 4) неспецифическая профилактика простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ;

5) снижение общего иммунитета в период реконвалесценции и реабилитации после перенесенных заболеваний.

Наиболее эффективно применение специализированного излучателя «Режим № 8» при КВЧ-пунктуре.

Для обозначения точек использована французская номенклатура, как наиболее удобная, а местоположение точек легко определить по приведенным рисункам (рекомендуемые точки обозначены красным цветом).

Рекомендуемая схема.

Целесообразно проведение одного сеанса КВЧ-пунктуры в сутки.

Во время каждого сеанса воздействие оказывается на две точки в порядке их перечисления в схеме лечения. Облучение каждой точки продолжается 15 мин. Общее время КВЧ-воздействия за сеанс составляет 30 мин.

Курс рассчитан на 8 дней. Такой курс можно повторять 2-3 раза в год.

I. Rp4 – V40

II. P10 – VB43

III. VG14 – Rp6

IV. C6 – F3